



## aspirator kataru

### INSTRUKCJA UŻYCIA

Katar jest powszechny u niemowląt i małych dzieci. Jednym z głównych problemów jest to, że małe dzieci nie potrafią wydmuchiwać nosa, a upływa sporo czasu zanim nauczą się oddychać przez usta. Zablokowany nos utrudnia oddychanie, może powodować dyskomfort i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych nosa, uszu, gardła i dróg oddechowych. Dlatego utrzymanie nosa w czystości jest tak ważne. Wydzielina w nosie utrudnia oddychanie, powoduje złe samopoczucie, a także dalsze komplikacje: zapalenie uszu, zatok i dolnych dróg oddechowych.

Aspirator do nosa **KATAREK Travel 2w1** jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie należy pomijać kontroli lekarskiej, ponieważ tylko lekarz może zdiagnozować przyczynę tych problemów.

**Zastosowanie:** Urządzenie służy do usuwania wydzieliny z nosa u dzieci. Nie stosować do innych celów.

### WAŻNE

**Pierwsze użycie:** Przed użyciem dokładnie opłucz urządzenie gorącą wodą. Nie mocz w detergencie!

**Czyszczenie:** Wyczyść urządzenie po każdym użyciu. Natychmiast umyj go w ciepłej wodzie z kranu z detergentem przyjaznym dla dziecka. Opłucz gorącą lub ciepłą wodą. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię aspiratora miękką ściereczką lub wacikami nasączonymi alkoholem etylowym klasy farmaceutycznej.

Nie używaj żadnych innych detergentów, środków chemicznych ani materiałów ściernych.

### OSTRZEŻENIE

W przypadku hemofilii lub częstego krwawienia z nosa należy poprosić o poradę medyczną. Jeśli po użyciu w okolicach noska dziecka zauważysz alergiczną wysypkę lub zaczerwienienie, przestań korzystać z urządzenia. Poproś o pomoc medyczną.

Gdy jest stosowany u kilku dzieci, zaleca się stosowanie osobnych końcówek dla każdego dziecka i przechowywanie ich podpisanych. Jeśli nie jest to możliwe, dokładnie wyczyść końcówkę przed każdym użyciem, tak jak opisano powyżej.

### OSTRZEŻENIE

- Używaj odkurzacza o zakresie mocy 800–1800W (bezpieczne użytkowanie potwierdzone jest testami.) Zapoznaj się z instrukcją obsługi odkurzacza.
- Aspirator do nosa i odkurzacz nie są zabawką dla dzieci. Katarek Travel musi być używany przez osobę dorosłą po przeczytaniu instrukcji.
- Używaj urządzenia tylko w wyznaczonym obszarze zastosowania.
- Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub go brakuje.
- Wyczyść końcówkę aspiratora (A) miękką ściereczką lub wacikami nasączonymi alkoholem etylowym klasy farmaceutycznej. Nie używaj innych chemikaliów.


### PRZECHOWYWANIE

Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym otoczeniu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i promieniowania ciepłego.

### SPOSÓB UŻYCIA


#### Sposób użycia aspiratora podłączanego do odkurzacza

1. Do komory **B** dołącz końcówkę **A**.
2. Wąski koniec aspiratora (część **C**) włóż do łącznika (część **D**). Stożkowy koniec aspiratora (część **C**) włóż do rury ssącej włączonego odkurzacza (800–1800 W).
3. Weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana. Końcówkę **A** przyłóż do otworu nosowego na kilka sekund i odciągaj wydzielinę. Czynność powtórz na drugiej dziurce.
4. Wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniami.

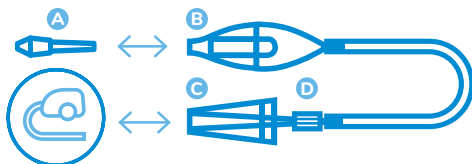

## Sposób użycia aspiratora ustnego

1. Do komory **B** dołącz końcówkę **A**.
2. Do łącznika (część **D**) włóż ustnik (część **E**).
3. Weź niemowlę na ręce lub posadź na kolana. Końcówkę **A** przyłóż do otworu nosowego, weź ustnik do ust i odciągaj wydzielinę. Czynność powtórz na drugiej dziurce.
4. Po oczyszczeniu noska wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniem.

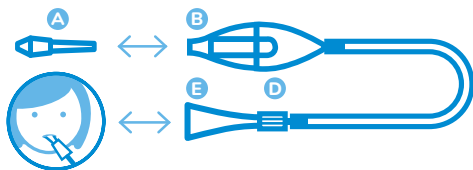


## UŻYTKOWANIE

1. Urządzenie można efektywnie użytkować w naturalnej postawie ciała. Sugeruje się, aby osoba dorosła korzystająca z urządzenia trzymała dziecko w ramionach lub na kolanach.
2. Umieść końcówkę **A** w taki sposób, aby całkowicie zablokowała jedno nozdrze i przytrzymaj ją przez kilka sekund, monitorując wydobywanie śluzu.
3. Powtórz poprzednie kroki na tym samym lub drugim nozdrzu.
4. Aby przyspieszyć proces, można ostrożnie przechodzić między krokami 2 i 3 (pomiędzy nozdrzami)
5. Czas odciągania wynosi około 5 sekund na nozdrze.
6. Po zakończeniu wyłącz odkurzacz i wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem.
7. Powtarzaj codziennie 2-3 razy lub tyle razy, ile jest to konieczne.

Żywotność urządzenia wynosi 3 lata. Bezpieczny w użyciu, pod warunkiem postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE

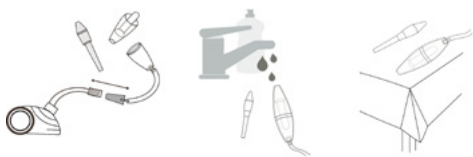

1. Wyłącz odkurzacz bezpośrednio po aspiracji.
2. Odłącz stożkowy koniec aspiratora **C** od odkurzacza.

3. Wymyj część **A** i **B** pod gorącą, bieżącą wodą i wyczyść zgodnie z powyższym opisem.
4. Pozostaw do wyschnięcia.

	Nazwa i adres wytwórcy
	Przeczytaj instrukcję użycia
	Ostrzeżenie
	Numer seryjny
	Chronić przed światłem słonecznym
mm.yyyy v0X	Data i numer wersji bieżącej instrukcji użycia

V01

Model II

01.2020

CE 0123

### Zatwierdzone przez:

Illés Csók Anna Dyrektor Zarządzający

### Nazwa i adres wytwórcy:

Illés Csók és Társa Kft.

Budapest H-1146 , Ajtósi Dürer sor 35.